

Kaiko-FlexiCheck

PESUTEHON VALVONTATESTI

Pesutehontesti endoskooppien pesulaitteelle. Testilaitte simuloi taipuisan endoskoopin kanavaa.


Toiminta

FlexiCheck on ainutlaatuinen testi endoskooppien pesukoneen pesutehon tarkkailuun. Taipuisat endoskoopit ovat usein kontaminoituja limasta, mutta joskus myös verestä.

FlexiCheckissä on yhdistettynä kaksi testitahraa yhdessä testiliuskassa: yksi on standardoitu verta simuloiva tahra ja toinen on polysakkaridien sekoitus.

FlexiCheck havainnollistaa pesukoneen ja pesuaineen pesutehon ja -tuloksen.

Endoskooppien uudelleen käsittelyn vuoksi suositellaan pesukoneita, joissa on kanavanhuuhtelujärjestelmä. FlexiCheck voidaan yhdistää tähän järjestelmään ja näin se simuloi/testaa yhtä kanavaa kerrallaan.

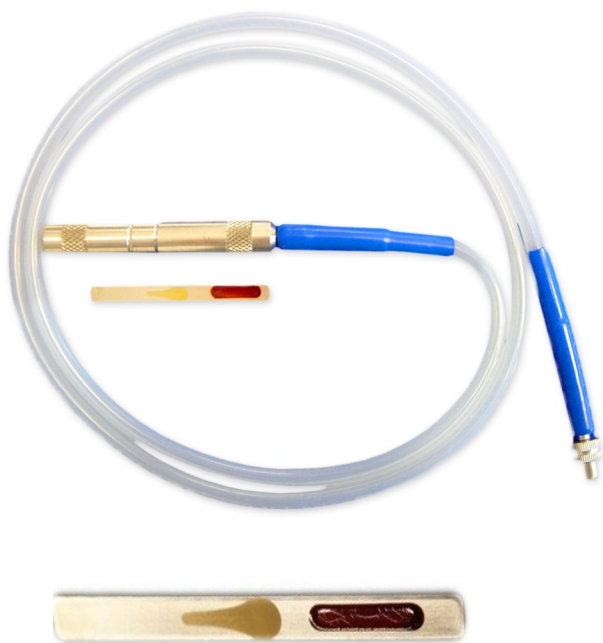

FlexiCheck –testi

Helppokäyttöinen

Kaksi testiä yhdessä liuskassa


Selkeä tehon ja tuloksen tulkinta

Yhdistettävissä kanavanhuuhtelu-
järjestelmällisiin pesukoneisiin



KaikoMedi

Tulkinta

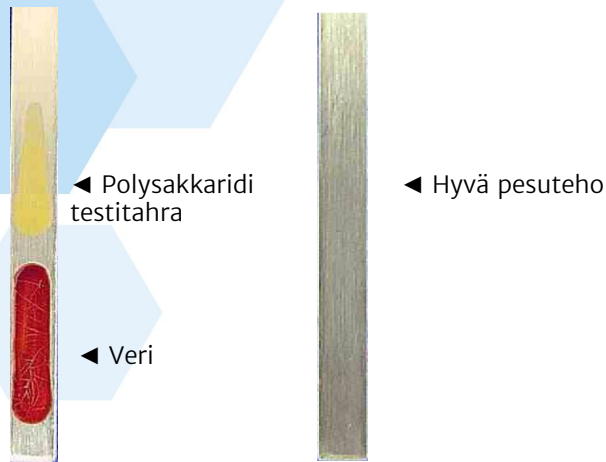

Fibriinijäämiä

◀ Pesuteho ei riitä fibriinin poistoon



Polysakkaridi- ja verijäämiä

◀ Tukkeutunut huuhtelujärjestelmä




Polysakkaridijäämiä

◀ Huuhtelu ei ole riittävän tehokas tai veden laatu on huono

Käyttöohje

Polysakkaridi testitahra

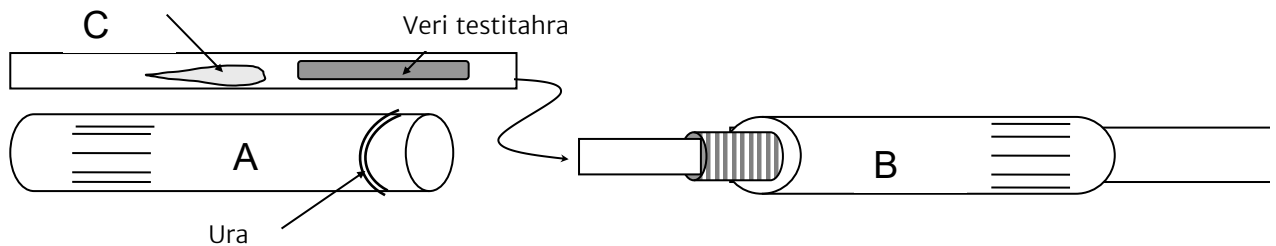

1. Avaa kierteellä oleva metallinen FlexiCheck-putki ja irrota sitten osat A (merkattu uralla) ja B toisistaan.
2. Avaa FlexiCheck -liuskaa suojaava pussi ja aseta liuska (C) putken osaan B. Älä koske liuskan testitahraan.
3. Sulje metalliputki uudestaan.
4. Liitä FlexiCheck-laite Luer-lockilla yhteen kanavien huuhtelujärjestelmästä ja aloita pesusykli koneen valmistajan ohjeiden mukaisesti.
5. Avaa testiputki pesuohjelman jälkeen irrottamalla A ja B osat toisistaan. Älä koske testitahroihiin.
6. Tarkastele tahrajäämiä, käytä apunasi kääntöpuolen tulkintaopasta.

Pakkaus
Testi-instrumentti ja liuskat myydään eri
PEREG08 1 kpl testi-instrumentti
PEREG09 25 kpl FlexiCheck testiliuskoja

Varastointi
Säilytä testiliuskat alkuperäisessä suojaussissa, huoneen lämmössä 15-30 °C
Avaa suojaussi vasta juuri ennen käyttöä
Katso viimeinen käyttöpäivä pakkauksesta