

Kaiko-CrossChecks P

STERILOINNIN VALVONTAAN

Kemiallinen Cross-Checks P prosessi-indikaattori on suunniteltu plasmasterilaattoreiden sterilointitehon tarkkailuun. Indikaattoriliuska tulisi asettaa jokaiseen steriloitavaan pakkaukseen.

Standardien En 867-1 luokan C, ISO 11140-1 luokan 4 mukainen.

Toiminta

Helppo todeta tulos värimuutoksen kautta. Liuskan violetti muuttuu värinsä pinkiksi, kun olosuhteet ovat olleet oikeat steriloitumisen kannalta.

Jokaisessa indikaattoriliuskassa on valmiiksi painettuna pinkki vakiovärinen nuoli, joka auttaa tulkinnassa.

Värimuutos aika on 30 minuuttia +/- 5 minuuttia.

Jokaisessa indikaattoriliuskassa on painettuna tuotannon numerosarja.

Käyttö

Aseta indikaattoriliuska jokaiseen steriloitavaan pakkaukseen.



CrossChecks P

Helppo käyttää

Plasmasterilaattoreiden sterilointitehon tarkkailuun

Helppo tulkinta

Laminoitu

Pakkaus	Varastointi
250 kpl/paketti. Tuotekoodi: CI-115.	Varastoi suojapussissa +10— +38 °C lämpötilassa, 30-60 % ilmankosteudessa. Varastointiaika: 2 vuotta valmistuspäivästä. Indikaattoreiden varastoinnin tapahtuessa ohjeiden mukaisesti, säilyvät sen värit ennen ja jälkeen steriloinnin erinomaisesti.