

# Kaiko-HeliCheck

## STERILOINNIN VALVONTAAN


**Prosessitesti onteloisten instrumenttien steriloinnin valvontaan. Testaa esityhjiöllisen höyry-autoklaavin ilmanpoisto- ja höyryntunkeutumiskykyä.**

**EN 867-5 ja EN 13060 mukainen testilaitte, jonka avulla varmistut, että ilma on poistunut koko 1,5 metrin matkalta ennen indikaattoriliuskaa. Liuskalle johtavan putken halkaisija on 2 mm.**

### Toiminta

Testi soveltuu 134 °C-ohjelmalle.

Testilaitte indikaattoreineen asetetaan kuorman joukkoon aina silloin, kun steriloidaan onteloisia instrumentteja. Tulos on luettavissa heti ohjelman päätyttyä.

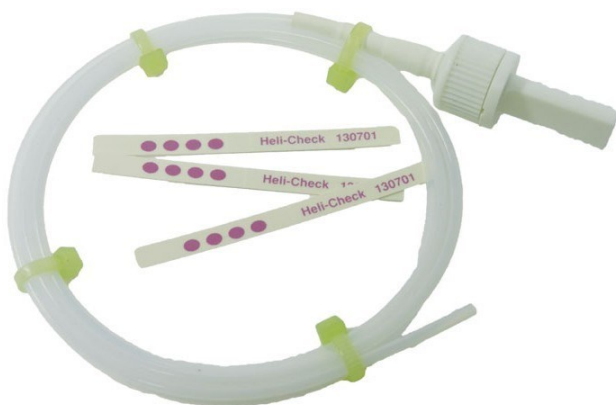

HeliCheck

### Tulkinta

Testituloksen ollessa virheellinen, suositellaan testin suorittamista uudelleen. Mikäli tulos on edelleen virheellinen, tutki HeliCheck käyttöohjeen ”Ongelman määrittäminen” kohtaa.

Kirjaa testitulos testikaavakkeeseen. Testiliuska on kiinnitettävissä testikaavakkeeseen.


## Helppo käyttää

## Onteloille instrumenteille

## Testaa ilmanpoisto- ja höyryntunkeutumiskykyä

## Soveltuu 134 °C ohjelmalle

### Tuloksen tulkinta

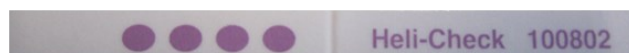

→ Alkuperäinen indikaattori.



→ Tulos OK. Oikea värinmuutos. Laitteen tyhjiöpumppu toimii tehokkaasti eikä ilmaa vuoda kammioon. Höyryntuotto, aika ja lämpötila ovat oikeat.



→ Epätäydellinen tulos. Testiliuskan väri ei ole muuttunut täysin mustaksi. Ilma ei ole poistunut täydellisesti ja siksi sterilointihöyry ei pääse kaikkialle steriloitaviin tuotteisiin.

### Pakkaus

250 kpl ja testilaitte.  
Tuotekoodi: LT-104.

### Varastointi

Säilytä huoneenlämmössä 10–38 °C kuivassa paikassa. Pidä indikaattoripussi huolellisesti suljettuna.